


SteriStretch® Einsätze für OP-Mehrwegtextil

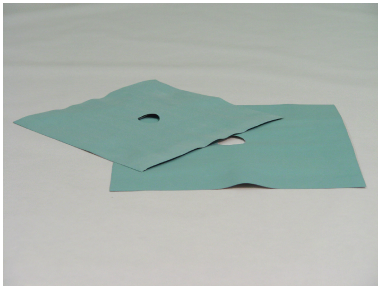

Verwendungszweck

SteriStretch® Einsätze sind zur Anwendung auf OP-Mehrwegtextil vorgesehen. Die Einsätze lassen sich einfach über einen konfektionierten Umriss im Abdecktuch anbringen. Dies schützt den Patienten und schafft ein steriles und hygienisches Operationsumfeld.

Produktbeschreibung


SteriStretch® sind latexfreie Einsätze mit einer Aussparung. Diese Einsätze sind mit einem 100% wäschelöslichen Klebstoff versehen. Während der Dampfsterilisation erreicht der Klebstoff seine größte Haftfestigkeit und sichert so eine starke Haftung zwischen Abdecktuch und Einsatz. Diese Einsätze sind in verschiedenen Größen erhältlich.

Anwendung


SteriStretch® Einsätze werden angebracht auf OP-Mehrwegtextil, wonach diese dampfsterilisiert werden und einsatzbereit sind. Nach der Anwendung wird das Abdecktuch gewaschen und der Einsatz dabei von der Textile entfernt. Nach diesem Vorgang kann an den Abdecktüchern ein neues Einsatzstück angebracht werden.

Qualitätssicherung

Die Einsätze werden gemäß den EN ISO 9001:2008 und ISO 13485:2003+AC:2007 Normen gefertigt. Damit ist sichergestellt, dass wir Produkte und Dienstleistungen liefern, welche konsistent die Kundenanforderungen erfüllen und volle Kundenzufriedenheit garantieren. Alle unsere Produkte haben eine CE-Kennzeichnung und entsprechen allen Anforderungen der Richtlinie 2007/47/EC über Medizinprodukte.

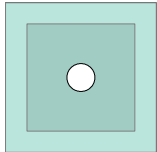

Einsatz mit Klebstoffbeschichtung

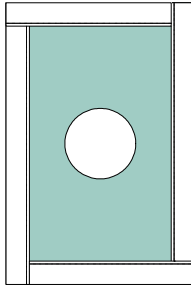

Einsatz mit OP-Tape




Vorteile

- Ermöglicht es, den Patienten mit einem einzelnen Tuch abzudecken.
- Die Einsätze sind 100% latexfrei.
- Die Einsätze werden durch Dampfsterilisation nicht beeinträchtigt.
- Der Klebstoff ist 100% wäschelöslich.
- Während der Dampfsterilisation erreicht der Klebstoff seine größte Haftfestigkeit und sichert so eine starke Haftung zwischen Abdecktuch und Einsatz.
- Die Einsätze nehmen nach dem Dehnen wieder ihre ursprüngliche Form an.
- Die Einsätze sind biokompatibel.
- Sondergrößen auf Anfrage erhältlich.

PRODUKTBEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN*	PRODUKT-NUMMER	VERPACKUNGSEINHEIT	ANWENDUNG
SteriStretch® 10-415	10 x 10cm / Ø 4x15mm	170.1010.415	125 Stück pro Schachtel	Für Rochard-Abdecktücher.
SteriStretch® 18-06	18 x 18cm / Ø 6mm	170.1818.006	125 Stück pro Schachtel	Für Endoskopie.
SteriStretch® 30-30	30 x 30cm / Ø 3,0cm	170.3030.030	150 Stück pro Schachtel	Für Hand-/Handgelenksoperationen.
SteriStretch® 30-35	30 x 30cm / Ø 3,5cm	170.3030.035	150 Stück pro Schachtel	Für Hand-/Handgelenksoperationen.
SteriStretch® 30-42	30 x 30cm / Ø 4,2cm	170.3030.042	150 Stück pro Schachtel	Für Hand-/Handgelenks-/Knieoperationen.
SteriStretch® 30-65	30 x 30cm / Ø 6,5cm	170.3030.065	150 Stück pro Schachtel	Für Knieoperationen.
SteriStretch® 35-30	35 x 35cm / Ø 3,0cm	170.3535.030	150 Stück pro Schachtel	Für Hand-/Handgelenksoperationen.
SteriStretch® 35-42	35 x 35cm / Ø 4,2cm	170.3535.042	150 Stück pro Schachtel	Für Hand-/Handgelenks-/Knieoperationen.
SteriStretch® 35-65	35 x 35cm / Ø 6,5cm	170.3535.065	150 Stück pro Schachtel	Für Knieoperationen.
SteriStretch® 35-80	35 x 35cm / Ø 8,0cm	170.3535.080	150 Stück pro Schachtel	Für Knieoperationen.
SteriStretch® 40-42	40 x 40cm / Ø 4,2cm	170.4040.042	125 Stück pro Schachtel	Für Hand-/Handgelenks-/Knieoperationen.
SteriStretch® 3560-245	35 x 60cm / Ø 2 x 4,5cm	170.3560.245	125 Stück pro Schachtel	Für bi-laterale Fußoperationen.
SteriStretch® 4060-15	40 x 60cm / Ø 15cm	170.4060.150	125 Stück pro Schachtel	Für Hüftoperationen.
SteriStretch® 3940-140	39 x 40cm / oval Ø 139,7mm	170.3940.140	125 Stück pro Schachtel	Für Schulteroperationen.

*Sondergrößen auf Anfrage erhältlich.

SteriStretch® Einsätze für OP-Mehrwegtextil

Eigenschaften	
• Sterilisation ¹	Dampfsterilisation ¹
• Aufbau ③ Synthetischer Kautschuk ② Klebstoff ① Abdeckpapier	wäschelöslich ²
• ③ Synthetischer Kautschuk Material Farbe Stärke Elastizität bis zur Bruchstelle (Minimum) Getestet auf Hautreizung (ISO 10993-10)	synthetischer Kautschuk Türkis 0.3 mm ± 15% > 650 % Ja
• ② Klebstoff Wäschelöslich ² Peel (FTM1/20 Min.) Shear (FTM8) Tack (FTM9)	Ja min. 25 Newtons / 25 mm min. 240 Min. min. 30 Newtons / 25 mm
• ① Abdeckpapier Farbe Grammage	Weiß 86 - 94 g/m ² Ja
• Griffkanten	Ja
• Latex Latexgehalt des Produkts	Latexfrei
• Lagerung Temperatur (optimal) (das Produkt von Wärmequellen fernhalten) Licht (vor längerer Bestrahlung von Sonnen- und starkem UV-Licht schützen)  Feuchtigkeit (feuchte Lagerbedingungen vermeiden)	15 °C- 25 °C Dunkle Bedingungen 40 % - 70 %
• Wiederverwendbarkeit	Nicht wiederverwendbar 
• Gebrauchsanleitung in der Originalverpackung vorhanden 	
• Unterstützte Qualitätssysteme und Richtlinien / Beschlüsse EN ISO 9001:2008 (Zertifikat auf Anfrage erhältlich) EN ISO 13485:2003+AC:2007 (Zertifikat auf Anfrage erhältlich) MDD 2007/47/EC, Medizinprodukt Klasse I (Konformitätserklärung auf Anfrage erhältlich)	Ja Ja Ja

¹ Wenden Sie Dampfsterilisation (Autoklav) für optimale Haftfestigkeit am Abdecktuch an.

² Der Klebstoff löst sich vollständig während des Waschverfahrens mit einem pH-Wert > 8 auf. Der SteriStretch® synthetische Kautschuk sollte nach dem Waschvorgang entfernt werden.