


## SteriShape™ Schablonen (Zugeschnittene OP-Tapes)

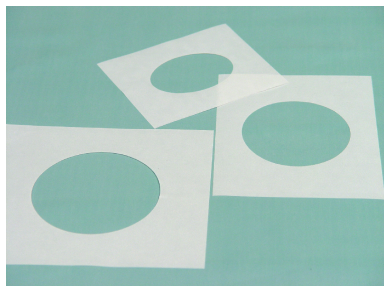

### Verwendungszweck

SteriShape™ Schablonen werden verwendet, um OP-Mehrwegtextil auf der Haut des Patienten anzubringen, um so ein steriles und hygienisches Operationsumfeld zu schaffen.

### Produktbeschreibung

SteriShape™ Schablonen sind zugeschnittene OP-Tapes speziell entwickelt für Abdecksysteme in der Fachchirurgie (z.B. Augen- oder Herzchirurgie). Diese aus den bewährten OP-Tapes von Eurotape gefertigten Schablonen bieten eine zuverlässige und sichere Versiegelung des Operationsbereichs. Der Klebstoff ist druck- und temperaturempfindlich und löst sich während des Waschvorgangs auf der Textilseite vollkommen auf. Auf der Patientenseite befindet sich eine desinfektionsmittelbeständige Klebstoffbeschichtung, die nicht löslich ist, aber keine Rückstände auf den Abdecktüchern hinterlässt.

### Anwendung

SteriShape™ Schablonen werden auf OP-Mehrwegtextil angebracht, welches anschließend dampfsterilisiert wird und einsatzbereit ist. Nach der Anwendung wird das Abdecktuch gewaschen und das Tape dabei von der Textilie entfernt. Nach diesem Vorgang kann eine neue Schablone auf dem Abdecktuch angebracht werden.

### Qualitätssicherung









Die Schablonen werden gemäß den EN ISO 9001:2008 und ISO 13485:2003+AC:2007 Normen gefertigt. Damit ist sichergestellt, dass wir Produkte und Dienstleistungen liefern, welche konsistent die Kundenanforderungen erfüllen und volle Kundenzufriedenheit garantieren. Alle unsere Produkte verfügen über eine CE-Kennzeichnung und erfüllen alle Anforderungen der Richtlinie 2007/47/EC über Medizinprodukte.

### Vorteile

- Während der Operation bleibt das Tape von Körper- und anderen während der OP eingesetzten Flüssigkeiten unbeeinflusst.
- Beschichtet mit zwei speziellen Klebstoffarten gewährleistet das Tape sowohl maximale Leistung während chirurgischer Verfahren wie auch während des Waschvorgangs in der Wäscherei.
- Die Haftfestigkeit der eingesetzten Klebstoff wird nicht nachteilig durch die Sterilisation beeinflusst und das Tape erreicht seine höchste Haftfestigkeit auf der Textilseite nach der Dampfsterilisation.
- Die Schablonen sind biokompatibel.
- Sondergrößen auf Anfrage erhältlich.

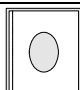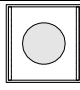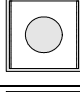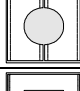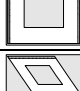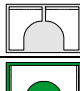


### Empfehlungen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

- Eine unsachgemäße Anwendung des Tapes kann Hautirritationen verursachen.
- Alkoholhaltige Desinfektionsmittel entfernen auch Hautfett. Das Tape haftet auch in diesen Bereichen gut.
- Wird ein öl- oder glyzerinhaltiges Desinfektionsmittel verwendet (hauptsächlich bei Operationen in Schleimhautbereichen) oder ein Desinfektionsmittel, das einen Film hinterlässt, kann die Haftung des Tapes beeinträchtigt werden.
- Die Haftfestigkeit hängt stark vom Zustand der Haut, deren Trockenheit und jeglichen aufgetragenen Desinfektionsmitteln (und deren Inhalten) ab.
- Entfernen Sie das Tape von der Haut (auch bei gesunder Haut) immer so, dass die Haut nicht nach oben gezogen wird. Wir empfehlen, das Tuch in einer parallel zur Haut verlaufenden Bewegung abziehen. Das heißt, in einem Winkel von 180 Grad.

PRODUKT-BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN*	PRODUKT-NUMMER	VERPACKUNGSEINHEIT	ANWENDUNG
SteriShape™ DC-xxx	 10 x 12cm / Ø 5x7cm 12 x 14,5cm / Ø 5x7cm 15 x 17cm / Ø8,5x13cm 17 x 21cm / Ø8,5x13cm	5x0.100120.5X7 5x0.120145.5X7 5x0.150170.813 5x0.170210.813	500 Stück pro Schachtel	Für Augen- oder Herzchirurgie.
SteriShape™ DC-xxx	 12 x 15cm / Ø8,0cm 15 x 16cm / Ø9,0cm 16 x 16cm / Ø6,0cm	5x0.120150.080 5x0.150160.090 5x0.160160.060	500 Stück pro Schachtel	Für Augenchirurgie.
SteriShape™ DC-xxx	 20 x 20cm / Ø11cm 20 x 20cm / Ø12cm 22 x 22cm / Ø8,4cm 22 x 22cm / Ø11,7cm	5x0.200200.110 5x0.200200.120 5x0.220220.084 5x0.220220.117	500 Stück pro Schachtel	Für Herzchirurgie.
SteriShape™ DC-xxx	 15 x 15cm / Ø8,0cm / 2x½ / 2xFL	5x0.150150.080	500 Stück pro Schachtel	Zwei halbe DC-Schablonen, um die Größe der Öffnung zu vergrößern oder zu verkleinern.
SteriShape™ DC-xxx	 20 x 20cm / □10cm 20 x 25cm / □10x15cm 22 x 22cm / □12cm	5x0.200200.100 5x0.200250.115 5x0.220220.120	500 Stück pro Schachtel	Mehrzweck Schablone.
SteriShape™ DC/RT-xxx	 ◇ 9,5 x 17,5cm (Tape = 4,5cm)	5x0.095175.45	500 Stück pro Schachtel	Spezielle DC-Schablone für Textilien mit einer rautenförmigen Öffnung.
SteriShape™ DC-xxx	 12,3 x 16,7cm Set von 2 Stück	5x0.123167.U2A	500 Stück pro Schachtel	Für U-Abdecktücher.
SteriShape™DC-PEH533	 22 x 22cm / Ø11,7cm	533.220220.117	500 Stück pro Schachtel	Für Herzchirurgie. Mit dieser Version bleibt die geschlossene Schutzschicht auf der Schablone bis zur Nutzung im OP.

\* Sondergrößen auf Anfrage erhältlich.

## SteriShape™ Schablonen (Zugeschnittene OP-Tapes)

Eigenschaften	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sterilisation</b></li> </ul>	Dampfsterilisation <sup>1</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Aufbau</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>④ Klebstoff</li> <li>③ Träger</li> <li>② Klebstoff</li> <li>① Abdeckpapier</li> </ul> </li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Basismaterial</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>SteriShape™ DC-PEW (Produkt Nr.: 510.*)</li> <li>SteriShape™ DC-TS (Produkt Nr.: 520.*)</li> <li>SteriShape™ DC-PEH (Produkt Nr.: 530.*)</li> <li>SteriShape™ DC-PEM (Produkt Nr.: 560.*)</li> <li>SteriShape™ DC-PEH533 (Produkt Nr.: 533.*)</li> </ul> </li> </ul> <p>Für technische Spezifikationen verweisen wir auf das Datenblatt zum Basismaterial.</p>	Med/PE175W™ Med/TS175™ Med/PE175H™ Med/PE175M™ umgedrehte Med/PE175H™ (speziell-Version)
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Griffkanten verfügbar</b></li> </ul>	Ja
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Latex</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Latexgehalt des Produkts</li> </ul> </li> </ul>	Latexfrei
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Lagerung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Temperatur (optimal) (das Produkt von Wärmequellen fernhalten)</li> <li>Licht (vor längerer Bestrahlung von Sonnen- und starkem UV-Licht schützen) </li> <li>Feuchtigkeit (feuchte Lagerbedingungen vermeiden)</li> </ul> </li> </ul>	15 °C- 25 °C Dunkle Bedingungen 40 % - 70 %
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Wiederverwendbarkeit</b></li> </ul>	Nicht wiederverwendbar 
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Gebrauchsanleitung in der Originalverpackung vorhanden</b> </li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Unterstützte Qualitätssysteme und Richtlinien / Beschlüsse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>EN ISO 9001:2008 (Zertifikat auf Anfrage erhältlich)</li> <li>EN ISO 13485:2003+AC:2007 (Zertifikat auf Anfrage erhältlich)</li> <li>MDD 2007/47/EC, Medizinprodukt Klasse I (Konformitätserklärung auf Anfrage erhältlich)</li> </ul> </li> </ul>	Ja Ja Ja

<sup>1</sup> Wenden Sie Dampfsterilisation (Autoklav) für optimale Haftfestigkeit am Abdecktuch an.