


SteriStretch® insertos para telas reutilizables

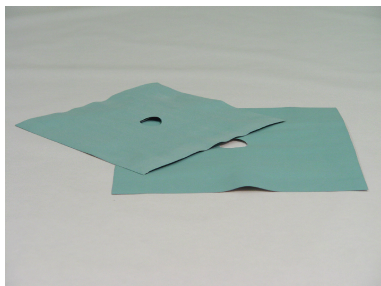


Uso indicado

Los insertos SteriStretch® se aplican sobre telas quirúrgicas reutilizables. Se pueden pegar fácilmente sobre el contorno a medida de la tela. Así se protege al paciente y se crea un entorno estéril e higiénico para la operación.


Descripción del producto

Los insertos SteriStretch® son láminas sin látex con una abertura provistas de adhesivo 100% soluble al lavado.

Durante la esterilización al vapor, el adhesivo alcanza su máxima fuerza adhesiva, lo cual garantiza una fuerte adhesión entre la tela y el inserto. Están disponibles en diferentes medidas.

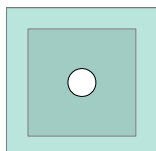

Inserto con una capa de adhesivo

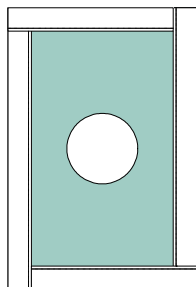

Inserto con cinta quirúrgica

Aplicación

Los insertos SteriStretch® se aplican a las telas reutilizables, tras lo cual son esterilizados al vapor y ya están listos para usar. Después de usarlos, la tela se procesa en la lavandería, donde se elimina el inserto. Tras este proceso, se puede aplicar un nuevo inserto.

Control de calidad

Los insertos se fabrican de acuerdo a los estándares EN ISO 9001:2008 y EN ISO 13485:2003+AC:2007, lo cual garantiza que nuestros productos y servicios cumplen de manera constante con los requisitos del cliente, garantizando así su satisfacción. Todos nuestros productos disponen de una etiqueta CE y cumplen con los requisitos de la Directriz sobre Dispositivos Médicos 2007/47/EC.




Ventajas

- Permiten proteger al paciente con una sola tela.
- Son 100% sin látex.
- No se ven afectados negativamente por la esterilización al vapor.
- El adhesivo es 100% soluble al lavado.
- Durante la esterilización al vapor, el adhesivo alcanza su máxima fuerza adhesiva, lo cual garantiza una fuerte adhesión entre la tela y el inserto.
- Vuelven a su estado original tras su estiramiento.
- Son biocompatibles.
- Productos a medida disponibles bajo petición.

NOMBRE PRODUCTO	MEDIDAS*	NÚMERO PRODUCTO	UNIDAD ENVASE	APLICACIÓN
SteriStretch® 10-415	10 x 10cm / Ø 4x15mm	170.1010.415	125 unidades por caja	Para telas Rochard.
SteriStretch® 18-06	18 x 18cm / Ø 6mm	170.1818.006	125 unidades por caja	Para cirugía endoscópica.
SteriStretch® 30-30	30 x 30cm / Ø 3,0cm	170.3030.030	150 unidades por caja	Para cirugía de la mano/muñeca.
SteriStretch® 30-35	30 x 30cm / Ø 3,5cm	170.3030.035	150 unidades por caja	Para cirugía de la mano/muñeca.
SteriStretch® 30-42	30 x 30cm / Ø 4,2cm	170.3030.042	150 unidades por caja	Para cirugía de la mano/muñeca/rodilla.
SteriStretch® 30-65	30 x 30cm / Ø 6,5cm	170.3030.065	150 unidades por caja	Para cirugía de la rodilla.
SteriStretch® 35-30	35 x 35cm / Ø 3,0cm	170.3535.030	150 unidades por caja	Para cirugía de la mano/muñeca.
SteriStretch® 35-42	35 x 35cm / Ø 4,2cm	170.3535.042	150 unidades por caja	Para cirugía de la mano/muñeca/rodilla.
SteriStretch® 35-65	35 x 35cm / Ø 6,5cm	170.3535.065	150 unidades por caja	Para cirugía de la rodilla.
SteriStretch® 35-80	35 x 35cm / Ø 8,0cm	170.3535.080	150 unidades por caja	Para cirugía de la rodilla.
SteriStretch® 40-42	40 x 40cm / Ø 4,2cm	170.4040.042	125 unidades por caja	Para cirugía de la mano/muñeca/rodilla.
SteriStretch® 3560-245	35 x 60cm / Ø 2 x 4,5cm	170.3560.245	125 unidades por caja	Para cirugía bilateral del pie.
SteriStretch® 4060-15	40 x 60cm / Ø 15cm	170.4060.150	125 unidades por caja	Para cirugía de la cadera.
SteriStretch® 3940-140	39 x 40cm / oval Ø 139,7mm	170.3940.140	125 unidades por caja	Para cirugía del hombro.

*Productos a medida disponibles bajo petición.

SteriStretch® insertos para telas reutilizables

Propiedades	
• Esterilización	esterilización al vapor ¹
• Construction ③ Estructura ② Adhesivo ① papel soporte	soluble al lavado ²
• ③ Goma sintética Material Color Grosor Alargamiento a la rotura Testado dermatológicamente (ISO 10993-10)	goma sintética turquesa 0.3 mm ± 15% > 650 % sí
• ② Adhesivo Soluble al lavado ² Peel (FTM1/20min.) Shear (FTM8) Tack (FTM9)	sí mín. 25 Newtons / 25mm mín. 240 min. mín. 30 Newtons / 25mm
• ① Papel soporte Color Gramaje	blanco 86 - 94 g/m ² sí
• Fingerlift disponible	sí
• Látex Contenido de látex del producto	sin látex
• Almacenamiento Temperatura (óptima) (mantener alejado del fuego y/o de las llamas) Luz (proteger de exposiciones prolongadas a la luz directa del sol y a rayos U.V. fuertes)  Humedad (evitar el almacenamiento en lugares húmedos)	15 - 25 °C en lugar oscuro 40 - 70 %
• Reutilización	no reutilizable 
• Instrucciones de uso presentes en el envase original 	
• Directivas QS EN ISO 9001:2008 (certificado disponible bajo petición) EN ISO 13485:2003+AC:2007 (certificado disponible bajo petición) MDD 2007/47/EC, dispositivo médico clase I (certificado de conformidad disponible bajo petición)	sí sí sí

¹ Se aconseja la esterilización al vapor (autoclave) para una adherencia óptima a las telas quirúrgicas.

² El adhesivo se disuelve completamente durante el proceso normal de lavado a un valor pH > 8. La goma sintética SteriStretch® debería ser eliminada después del proceso de lavado.