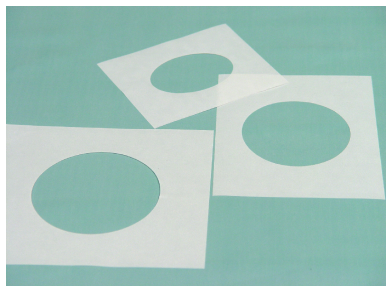


SteriShape™ apósitos (cintas quirúrgicas precortadas)



Uso indicado

Los apósitos SteriShape™ están indicados para su aplicación en telas reutilizables sobre la piel del paciente a fin de crear un entorno quirúrgico estéril e higiénico.

Descripción del producto

Los apósitos SteriShape™ son cintas quirúrgicas precortadas diseñadas especialmente para sistemas de cobertura para cirugía especializada (p.ej. oftalmológica o cardíaca). Estos apósitos, elaborados a partir de cintas quirúrgicas Eurotape probadas, ofrecen una manera segura de sellar el campo quirúrgico (ver especificaciones en el reverso). Los adhesivos son sensibles a la presión y la temperatura y son completamente solubles en el lado de la tela durante el proceso de lavado. En el lado en contacto con el paciente, el revestimiento adhesivo es resistente a los desinfectantes; a pesar de no ser soluble, no deja residuo ninguno en la tela.

Aplicación

Los apósitos SteriShape™ se aplican a la tela reutilizable. Tras su esterilización, ya están listos para usar. Después de usarla, se procesa en la lavandería, donde se elimina la cinta de la tela. Tras este proceso, se puede aplicar un nuevo apósito en la tela.

Control de calidad

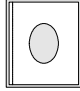
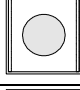
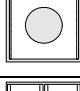
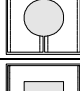
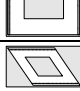
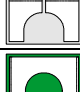
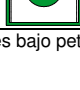

Se fabrican de acuerdo a los estándares EN ISO 9001:2008 y EN ISO 13485:2003+AC:2007, lo cual garantiza que nuestros productos y servicios cumplen de manera constante con los requisitos del cliente, garantizando así su satisfacción. Todos nuestros productos disponen de una etiqueta CE y cumplen con los requisitos de la Directriz sobre Dispositivos Médicos 2007/47/EC.

Ventajas

- Durante la operación, la cinta no se ve afectada por los fluidos corporales ni por otros líquidos usados.
- Al estar provista de dos tipos de adhesivo especiales, garantiza tanto un máximo rendimiento durante las intervenciones quirúrgicas como una fácil solubilidad durante el proceso de lavado.
- La fuerza de adhesión de los adhesivos empleados no se ve afectada negativamente por la esterilización. La cinta alcanza su máxima fuerza adhesiva en el lado de la tela, tras la esterilización mediante vapor.
- Los apósitos son biocompatibles.
- Productos a medida disponibles bajo petición.




Recomendaciones, advertencias y precauciones

- En caso de usarla incorrectamente, el adhesivo puede causar irritación de la piel.
- Los desinfectantes que contienen alcohol, además de desinfectar, también desengrasan la piel. La cinta se adhiere bien sobre este tipo de superficies.
- Si para las operaciones sobre superficies de la mucosa se usa un desinfectante que contiene aceite o glicerina (también para la cirugía general) o un desinfectante que deja una película sobre la piel, esto puede afectar negativamente a la fuerza adhesiva de la cinta.
- La fuerza adhesiva depende totalmente del estado de la piel, de su sequedad, de cualquier desinfectante usado (y de sus propiedades).
- Eliminar la cinta de la piel (incluso de la piel sana) sin tirar nunca de la piel hacia arriba. Se recomienda eliminar la tela de la piel con cuidado realizando un movimiento paralelo a la piel, es decir, a un ángulo de 180 grados.

NOMBRE PRODUCTO	MEDIDAS*	NÚMERO PRODUCTO	UNIDAD ENVASE	APLICACIÓN
SteriShape™ DC-xxx	 10 x 12cm / Ø 5x7cm 12 x 14,5cm / Ø 5x7cm 15 x 17cm / Ø8,5x13cm 17 x 21cm / Ø8,5x13cm	5x0.100120.5X7 5x0.120145.5X7 5x0.150170.813 5x0.170210.813	500 unidades por caja	Para cirugía oftalmológica o cardíaca.
SteriShape™ DC-xxx	 12 x 15cm / Ø8,0cm 15 x 16cm / Ø9,0cm 16 x 16cm / Ø6,0cm	5x0.120150.080 5x0.150160.090 5x0.160160.060	500 unidades por caja	Para cirugía oftalmológica.
SteriShape™ DC-xxx	 20 x 20cm / Ø11cm 20 x 20cm / Ø12cm 22 x 22cm / Ø8,4cm 22 x 22cm / Ø11,7cm	5x0.200200.110 5x0.200200.120 5x0.220220.084 5x0.220220.117	500 unidades por caja	Para cirugía cardíaca.
SteriShape™ DC-xxx	 15 x 15cm / Ø8,0cm 2x½ / 2xFL	5x0.150150.080	500 unidades por caja	Un apósito en dos mitades para aumentar o disminuir la medida del agujero.
SteriShape™ DC-xxx	 20 x 20cm / □10cm 20 x 25cm / □10x15cm 22 x 22cm / □12cm	5x0.200200.100 5x0.200250.115 5x0.220220.120	500 unidades por caja	Apósito de uso general.
SteriShape™ DC/RT-xxx	 9,5 x 17,5cm (cinta = 4,5cm)	5x0.095175.45	500 unidades por caja	Apósito especial para tela con una abertura bordada en forma de diamante.
SteriShape™ DC-xxx	 12,3 x 16,7cm set de 2 unidades	5x0.123167.U2A	500 unidades por caja	Para telas en forma de U.
SteriShape™DC-PEH533	 22 x 22cm / Ø11,7cm	533.220220.117	500 unidades por caja	Para cirugía cardíaca. Con esta versión, el liner cerrado permanece sobre el apósito hasta su uso en quirófano.

*Productos a medida disponibles bajo petición.

SteriShape™ apósitos (cintas quirúrgicas precortadas)

Propiedades	
<ul style="list-style-type: none"> Esterilización 	esterilización al vapor ¹
<ul style="list-style-type: none"> Estructura <ul style="list-style-type: none"> ④ Adhesivo en el lado de la tela ③ Membrana ② Adhesivo en el lado en contacto con el paciente ① Papel soporte 	
<ul style="list-style-type: none"> Base material <ul style="list-style-type: none"> SteriShape™ DC-PEW (Product no.: 510.*) SteriShape™ DC-TS (Product no.: 520.*) SteriShape™ DC-PEH (Product no.: 530.*) SteriShape™ DC-PEM (Product no.: 560.*) SteriShape™ DC-PEH533 (Product no.: 533.*) <p>Para las especificaciones técnicas, le remitimos a la hoja de datos del material base.</p>	Med/PE175W™ Med/TS175™ Med/PE175H™ Med/PE175M™ Med/PE175H™ invertido (estructura especial)
<ul style="list-style-type: none"> Fingerlift disponible 	sí
<ul style="list-style-type: none"> Látex <p>Contenido de látex en el producto</p>	sin látex
<ul style="list-style-type: none"> Almacenamiento <p>Temperatura (óptima) (mantener alejado del fuego y/o de las llamas) Luz (proteger de exposiciones prolongadas a la luz directa del sol y a rayos U.V. fuertes)  Humedad (evitar el almacenamiento en lugares húmedos)</p>	15 - 25 °C en lugar oscuro 40 - 70 %
<ul style="list-style-type: none"> Reutilización 	no reutilizable 
<ul style="list-style-type: none"> Instrucciones de uso presentes en el envase original  	
<ul style="list-style-type: none"> Directivas QS <p>EN ISO 9001:2008 (certificado disponible bajo petición) EN ISO 13485:2003+AC:2007 (certificado disponible bajo petición) MDD 2007/47/EC, dispositivo médico clase I (certificado de conformidad disponible bajo petición)</p>	sí sí sí

¹ Se aconseja la esterilización al vapor (autoclave) para una adherencia óptima a la tela quirúrgica.