


SteriStretch® Inserti per teli riutilizzabili

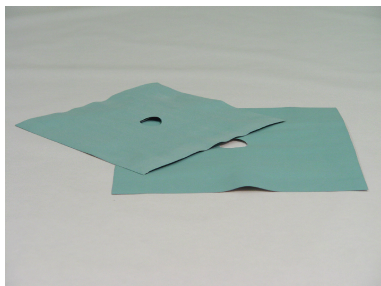


Usò previsto

Scopo degli inserti SteriStretch® è l'applicazione a teli chirurgici riutilizzabili. Essi possono essere facilmente incollati sull'apertura praticata nel telo, in modo tale da offrire protezione al paziente e creare un ambiente operatorio sterile e igienico.


Descrizione del prodotto

Gli inserti SteriStretch® sono fogli privi di lattice, dotati di apertura e provvisti di adesivo 100% solubile al lavaggio. Durante la sterilizzazione a vapore l'adesivo raggiunge la sua massima forza d'incollaggio assicurando una perfetta adesione fra telo e inserto.

Gli inserti sono disponibili in diverse misure.

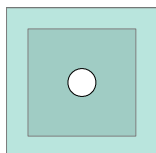

Inserto con rivestimento adesivo

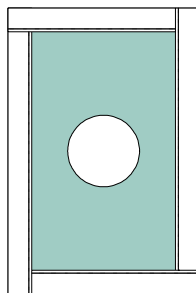

Inserto con nastro OP

Applicazione

Gli inserti SteriStretch® vengono dapprima applicati ai teli riutilizzabili, quindi sterilizzati a vapore, dopo di che sono pronti per l'uso. In seguito all'utilizzo, durante le operazioni di lavanderia gli inserti vengono rimossi dai teli che, alla fine del processo di lavaggio, potranno essere muniti di nuovi inserti.

Assicurazione della qualità

Gli inserti sono fabbricati in conformità alle normative EN ISO 9001:2008 e EN ISO 13485:2003+AC:2007, che garantiscono un prodotto e un servizio in grado di soddisfare sempre i requisiti dei clienti con loro piena soddisfazione. Tutti i nostri prodotti portano l'etichetta CE e soddisfano i requisiti della Direttiva sui Dispositivi Medici 2007/47/CE.




Vantaggi

- Rende possibile la protezione del paziente con un unico telo.
- Gli inserti sono al 100% privi di lattice.
- La prestazione degli inserti non è compromessa dalla sterilizzazione a vapore.
- L'adesivo è 100% solubile al lavaggio.
- Durante la sterilizzazione a vapore l'adesivo raggiunge la sua massima forza d'incollaggio assicurando una perfetta adesione fra telo e inserto.
- Gli inserti ritornano alla forma originaria dopo lo stiramento.
- Gli inserti sono biocompatibili.
- Le dimensioni possono essere personalizzate su richiesta.

NOME PRODOTTO	DIMENSIONI*	CODICE PRODOTTO	CONFEZIONE	APPLICAZIONE
SteriStretch® 10-415	10 x 10cm / Ø 4x15mm	170.1010.415	Scatola da 125 pezzi	Teli Rochard.
SteriStretch® 18-06	18 x 18cm / Ø 6mm	170.1818.006	Scatola da 125 pezzi	Chirurgia endoscopica.
SteriStretch® 30-30	30 x 30cm / Ø 3,0cm	170.3030.030	Scatola da 150 pezzi	Chirurgia della mano e del polso.
SteriStretch® 30-35	30 x 30cm / Ø 3,5cm	170.3030.035	Scatola da 150 pezzi	Chirurgia della mano e del polso.
SteriStretch® 30-42	30 x 30cm / Ø 4,2cm	170.3030.042	Scatola da 150 pezzi	Chirurgia della mano, del polso e del ginocchio.
SteriStretch® 30-65	30 x 30cm / Ø 6,5cm	170.3030.065	Scatola da 150 pezzi	Chirurgia del ginocchio.
SteriStretch® 35-30	35 x 35cm / Ø 3,0cm	170.3535.030	Scatola da 150 pezzi	Chirurgia della mano e del polso.
SteriStretch® 35-42	35 x 35cm / Ø 4,2cm	170.3535.042	Scatola da 150 pezzi	Chirurgia della mano, del polso e del ginocchio.
SteriStretch® 35-65	35 x 35cm / Ø 6,5cm	170.3535.065	Scatola da 150 pezzi	Chirurgia del ginocchio.
SteriStretch® 35-80	35 x 35cm / Ø 8,0cm	170.3535.080	Scatola da 150 pezzi	Chirurgia del ginocchio.
SteriStretch® 40-42	40 x 40cm / Ø 4,2cm	170.4040.042	Scatola da 125 pezzi	Chirurgia della mano, del polso e del ginocchio.
SteriStretch® 3560-245	35 x 60cm / Ø 2 x 4,5cm	170.3560.245	Scatola da 125 pezzi	Chirurgia del piede bilaterale.
SteriStretch® 4060-15	40 x 60cm / Ø 15cm	170.4060.150	Scatola da 125 pezzi	Chirurgia dell'anca.
SteriStretch® 3940-140	39 x 40cm / ovale Ø 139,7mm	170.3940.140	Scatola da 125 pezzi	Chirurgia della spalla.

* Le dimensioni possono essere personalizzate su richiesta.

SteriStretch® Inserti per teli riutilizzabili

Proprietà	
• Sterilizzazione	sterilizzazione a vapore ¹
• Struttura ③ Gomma sintetica ② Adesivo ① Lliner	solubile al lavaggio ²
• ③ Gomma sintetica Materiale Colore Spessore Allungamento alla rottura Test di irritazione cutanea (ISO 10993-10)	gomma sintetica turchese 0.3 mm ± 15% > 650 % sí
• ② Adesivo Solubile al lavaggio ² Peel (FTM1/20min.) Shear (FTM8) Tack (FTM9)	sí min. 25 Newtons / 25mm min. 240 min. min. 30 Newtons / 25mm
• ① Lliner Colore Grammatura	bianco 86 - 94 g/m ² sí
• Fingerlift disponibili	
• Lattice Contenuto dilattice	privo di lattice
• Immagazzinaggio Temperatura (ottimale) (tenere al riparo da fonti di calore e/o fiamme) Luce (proteggere da esposizioni prolungate alla luce diretta del sole e forti raggi U.V.)  Umidità (evitare l'immagazzinaggio in ambienti umidi)	15 - 25 °C tenere al riparo dalla luce 40 - 70 %
• Riutilizzo	non riutilizzabile 
• Le istruzioni per l'uso sono incluse nell'imballaggio originale 	
• Direttive QS EN ISO 9001:2008 (certificato disponibile su richiesta) EN ISO 13485:2003+AC:2007 (certificato disponibile su richiesta) MDD 2007/47/EC, dispositivi medici classe I (certificato di conformità disponibile su richiesta)	sí sí sí

¹ Utilizzare la sterilizzazione a vapore (autoclave) per ottenere la massima forza di adesione al telo chirurgico.

² L'adesivo si dissolve completamente durante un normale processo di lavaggio con valore pH > 8. La gomma sintetica SteriStretch® dovrebbe essere eliminata dopo il lavaggio.